

Une prévention des piqûres d'aiguille qui répond à vos besoins



- ▶ réduit l'exposition aux aiguilles contaminées
- ▶ permet l'activation avec une seule main
- ▶ mécanisme de sécurité intégré
- ▶ une fois activée, l'aiguille est rétractée sans risques à travers l'élément de mise au rebut
- ▶ facile à utiliser

**LES CATHÉTERS INTRA VEINEUX VANISHPOINT®
AVEC CHAMBRE D'INJECTION SONT SÛRS ET EFFICACES**

Cathéters intraveineux VanishPoint® - Avec chambre d'injection 50 par boîte/200 par coffret

Número catalogue	Diamètre	Longueur Pouces mm	Diamètre ext. du cathéter	Matériau du cathéter	Code couleur
38221	24	¾ 19	0,07 mm	Radio-opaque	Jaune
38331	22	1 25	0,09 mm	Radio-opaque	Bleu
38441	20	1¼ 32	1,1 mm	Radio-opaque	Rose
38541	18	1¼ 32	1,3 mm	Radio-opaque	Vert
38641	16	1¼ 32	1,7 mm	Radio-opaque	Gris
38741	14	1¼ 32	2,1 mm	Radio-opaque	Orange

D'autres tailles sont disponibles. Veuillez contacter RTI ou visiter notre site web www.vanishpoint.com pour obtenir la liste complète de nos produits.

Autres produits de sécurité disponibles

Nouveau !




Kit de prélèvement sanguin VanishPoint®



Porte-tubes de recueil de sang VanishPoint®



Seringue VanishPoint®

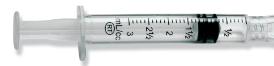

Seringue Patient Safe®



© 2013, 2014 Retractable Technologies, Inc.
Tous droits réservés. M066 REV00 FR, FEB 2014

511 Lobo Lane
Little Elm, Texas 75068-0009 États-Unis
Tél : +1 972-294-1770
Fax : +1 972-294-4400
rti.intl@vanishpoint.com

SÉCURITÉ SANS COMPROMIS POUR LES CLINICIENS ET LES PATIENTS



VANISHpoint®
CATHÉTER INTRA VEINEUX
AVEC CHAMBRE D'INJECTION

La nouvelle norme de sécurité


1

Réalisez la ponction veineuse en observant le reflux du sang. Poussez légèrement le cathéter pour s'assurer qu'il a correctement pénétré la veine.



2

En maintenant stationnaire la chambre de retour en arrière, enlevez le pavillon de l'aiguille d'introduction et faites avancer le cathéter à l'intérieur de la veine.

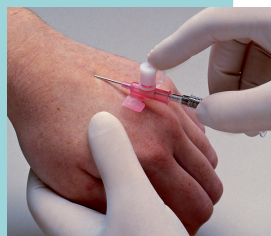

3

Avant d'enlever l'aiguille d'introduction du cathéter, appuyez sur l'extrémité à code couleur du logement de l'aiguille pour activer la rétraction automatique.



4

L'aiguille d'introduction se rétractera à l'intérieur du logement. Jetez l'aiguille d'introduction dans un récipient pour objets tranchants approprié.



Pour injecter le produit à l'aide de la chambre d'injection, utilisez une technique aseptique pour effectuer les opérations suivantes :

Retirez le capuchon du produit. Fixez correctement l'extrémité Luer de la seringue dans la chambre d'injection et injectez le produit.

Après l'injection, remettez immédiatement en place la gaine de la chambre d'injection.



le VANISHPOINT® ADVANTAGE

Un cathéter intraveineux sécurisé avec chambre d'injection, équipé de la rétraction automatique brevetée VanishPoint®



Les cathéters intraveineux VanishPoint® avec chambre d'injection sont disponibles dans une grande variété de longueurs et de diamètres

La chambre d'injection avec gaine permet l'injection de médicaments de manière sécurisée et aisée

Les prises transparentes pour les doigts et la chambre de retour en arrière permettent une manipulation facile ainsi qu'une visualisation du retour en arrière



Aiguille d'introduction pointue pour une insertion facile et le confort du patient

Les ailettes permettent la stabilisation et la sécurisation du raccord

Le raccord, les ailettes et le logement du cathéter présentent des codes de couleur, conformément aux normes ISO, afin d'identifier facilement le diamètre du cathéter



La rétraction automatique de l'aiguille survient avec une légère dépression du logement de l'aiguille. Une fois activée, l'aiguille est rétractée sans risques à l'intérieur du logement, réduisant ainsi le risque de blessures par piqûres d'aiguille.