

# EASYPPOINT®






aiguille rétractable

## INFORMATIONS RELATIVES À L'UTILISATION DU PRODUIT

- 1** En appliquant une technique aseptique, ouvrir l'emballage puis fixer fermement l'aiguille EasyPoint à la seringue. Retirer délicatement le capuchon de l'aiguille. Ne pas appuyer sur l'onglet coloré en retirant le capuchon de l'aiguille. Une fois le capuchon de l'aiguille retiré, ne pas appuyer sur l'onglet coloré avant qu'il soit nécessaire de retirer l'aiguille.
- 2** Choisir et préparer le site d'injection/aspiration et préparer et administrer le médicament en appliquant une technique aseptique.
- 3** Une fois le médicament administré, appliquer une pression sur la languette à code couleur et sur la chambre de sécurité en effectuant un mouvement de compression. Ne pas pousser la languette à code couleur vers le haut. Ce dispositif est conçu pour être activé avant ou après avoir retiré l'aiguille du patient. Une activation avant retrait permet de minimiser l'exposition à l'aiguille contaminée et de réduire le risque de blessures. L'activation peut être effectuée d'un certain nombre de façons.
- 4** Lorsqu'une pression est appliquée sur la languette à code couleur et sur la chambre de sécurité par mouvement de compression, la chambre de sécurité et la seringue glissent vers la languette à code couleur, permettant ainsi une rétraction automatique de l'aiguille dans la chambre de sécurité. Si le mécanisme de rétraction de l'aiguille ne s'active pas, jeter l'aiguille dans un conteneur pour objets pointus conformément au protocole de l'établissement. Ne pas remettre de bouchon sur les aiguilles contaminées.
- 5** Mettre au rebut l'aiguille et la seringue utilisées, dans un conteneur pour objets pointus, conformément au protocole de l'établissement.

### Précautions

À usage unique. La réutilisation de ce dispositif peut provoquer une exposition à des pathogènes sanguins, y compris au virus de l'hépatite B (VHB), au virus de l'hépatite C (VHC) et au virus d'immunodéficience humaine (VIH). Ne pas utiliser si le produit ou l'emballage est endommagé. Ne contient pas de latex de caoutchouc naturel. Ne contient pas de DEHP. Ne contient pas de PVC. Elles peuvent également être utilisées pour l'injection ou l'aspiration de fluides utilisant des dispositifs d'accès externes adaptés à l'utilisation de l'aiguille. Aucun liquide médicamenteux prescrit contre-indiqué connu. L'activation du mécanisme de rétraction après le retrait de l'aiguille peut provoquer de légères éclaboussures. Selon la loi fédérale américaine, ce dispositif ne peut être vendu que par un médecin ou sur ordonnance.

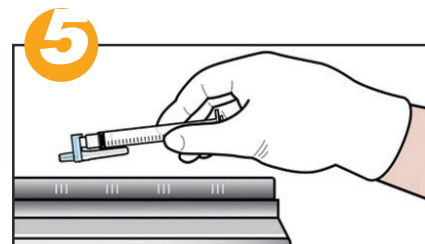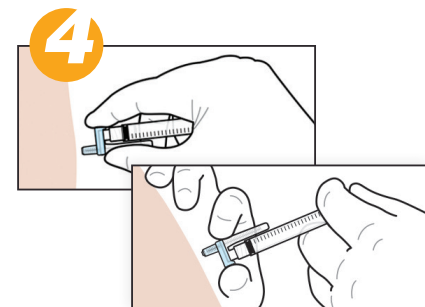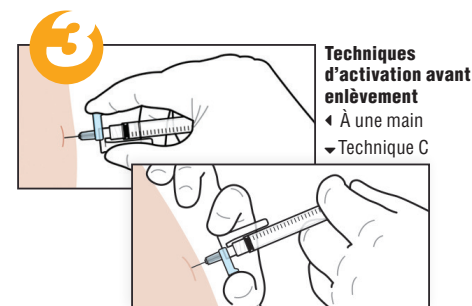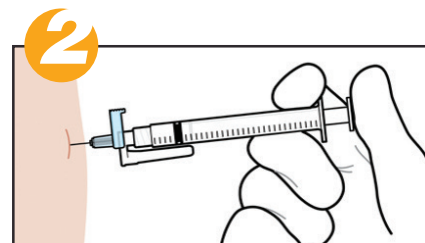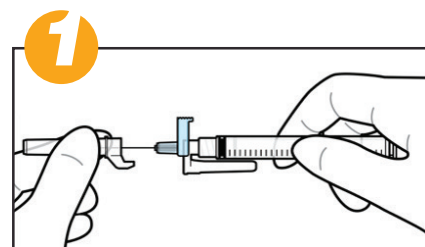

M134 REV.1 FR, JAN 2021



©2018, 2021 Copyright Retractable Technologies, Inc. Tous droits réservés.