

# EASYPPOINT®

agulha retrátil

- RETRAÇÃO AUTOMÁTICA DE AGULHA
- FÁCIL DE USAR, EXIGE TREINAMENTO MÍNIMO
- PODE SER ATIVADO ANTES OU APÓS A REMOÇÃO DO PACIENTE
- ATIVAÇÃO ANTERIOR À REMOÇÃO REDUZ O RISCO DE EXPOSIÇÃO À PONTA CONTAMINADA
- A ATIVAÇÃO PODE SER FEITA DE VÁRIAS FORMAS
- REDUZ EFICIENTEMENTE O RISCO DE FERIMENTOS POR AGULHA
- PREVINE O RECAPAMENTO APÓS O USO
- PERMANECE SEGURA DURANTE O DESCARTE

compatível com a trava luer e com as seringas luer slip (3 mL ou menores)



pode ser usada com seringas pré-preenchidas



## EASYPPOINT

AGULHAS RETRÁTEIS  
(50 por caixa/400 por estojo)

| Nº Catálogo | Tamanho da<br>agulha |
|-------------|----------------------|
| 82091       | 25G x 16 mm          |
| 82011       | 25G x 25 mm          |
| 82031       | 23G x 25 mm          |

### OUTROS PRODUTOS DE SEGURANÇA DISPONÍVEIS

Seringa VanishPoint®

Adaptador para tubos de coleta de sangue  
VanishPoint®

Conjunto de coleta de sangue VanishPoint®

Cateter I.V. VanishPoint®

Seringa Patient Safe®



511 Lobo Lane, Little Elm, TX 75068-5295

P +1•972•294•1770 TF +1•888•703•1010 F +1•972•294•4400  
rtiservice@vanishpoint.com

© 2017 Copyright Retractable Technologies, Inc. Todos os direitos reservados.

M126 REV.0 PT, OCT 2017

# NOVO EASYPPOINT®

agulha retrátil



## — FÁCIL DE USAR —

- mudança mínima na técnica de injeção
- permite ativação com uma só mão
- **as mãos e os dedos do médico permanecem atrás da ponta exposta** em todos os momentos



1  
Conecte a agulha EasyPoint a qualquer trava luer ou seringa luer slip.\* Administre a medicação de acordo com a política institucional.




2  
Pressione a guia codificada por cor, permitindo que a agulha se retraia automaticamente para dentro da câmara de segurança. **Este dispositivo foi projetado para ativação antes ou depois da remoção da agulha do paciente.**



3  
Descarte em recipientes apropriados para instrumentos pontiagudos de acordo com o protocolo da instituição.

\*seringa de 3 mL ou menor

Uma agulha lubrificada e triplamente chanfrada oferece conforto ao paciente

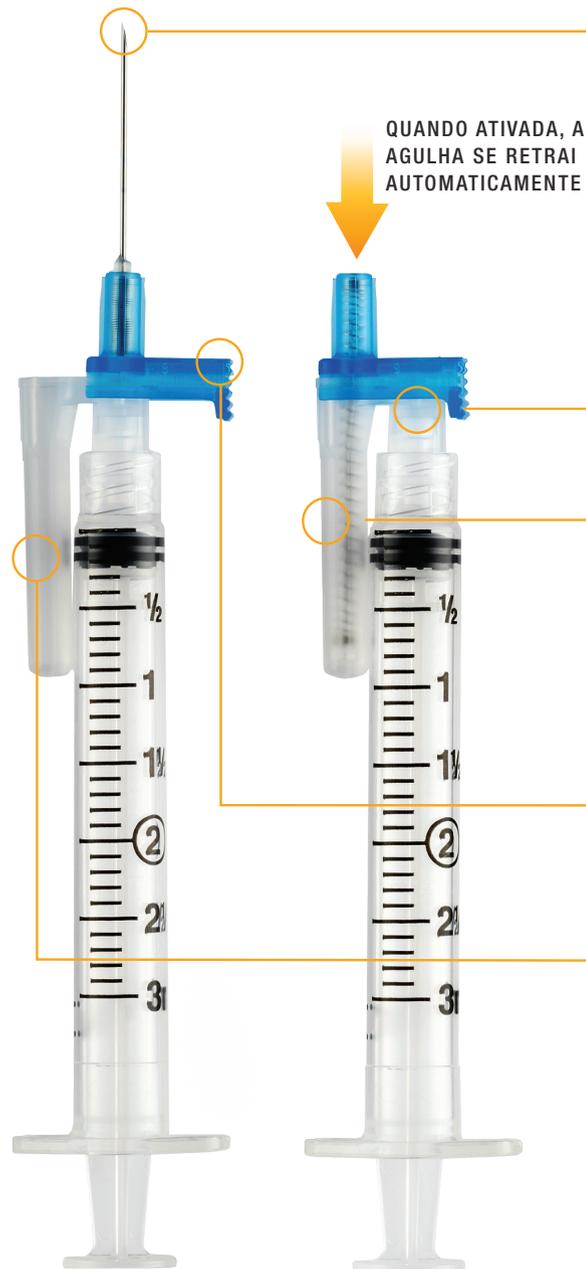

QUANDO ATIVADA, A AGULHA SE RETRAI AUTOMATICAMENTE

O encaixe padrão de luer fornece uma conexão segura, resistente a vazamentos

Após a retração, a agulha contaminada é fechada numa câmara de segurança para evitar exposição

O hub da agulha e a guia de ativação são codificados por cores de acordo com o calibre da agulha

Câmara de segurança transparente e compacta, não interfere com a injeção

RETRAÇÃO AUTOMÁTICA  
- agora com -  
MAIS VERSATILIDADE

EASYPOINT®