

EASYPPOINT®

aguja retráctil

- RETRACCIÓN AUTOMÁTICA DE LA AGUJA
- FÁCIL DE USAR, REQUIERE UN ENTRENAMIENTO MÍNIMO
- PUEDE ACTIVARSE ANTES O DESPUÉS DE RETIRARSE DEL PACIENTE
- LA ACTIVACIÓN ANTES DE RETIRAR REDUCE EL RIESGO DE EXPOSICIÓN AL OBJETO PUNZOCORTANTE CONTAMINADO
- LA ACTIVACIÓN PUEDE REALIZARSE DE VARIAS MANERAS
- REDUCE EFECTIVAMENTE EL RIESGO DE LESIONES POR AGUJAS
- EVITA QUE VUELVA A COLOCARSE LA TAPA DESPUÉS DEL USO
- SIGUE SIENDO SEGURA DESPUÉS DE SU DESECHO

compatible con jeringas luer lock y luer slip (3 mL o más pequeñas)



puede usarse con jeringas prellenadas



EASYPPOINT

AGUJAS RETRÁCTILES
(50 por caja/400 por estuche)

Núm. de catálogo	Tamaño de la aguja
82091	25G x 16 mm
82011	25G x 25 mm
82031	23G x 25 mm

OTROS PRODUCTOS DE SEGURIDAD DISPONIBLES

Jeringa VanishPoint®

Portatubos para muestras sanguíneas
VanishPoint®

Set de extracción de sangre VanishPoint®

Catéter IV VanishPoint®

Jeringa Patient Safe®



RETRACTABLE
TECHNOLOGIES, INC.
www.retractable.com

511 Lobo Lane, Little Elm, TX 75068-5295

P +1•972•294•1770 TF +1•888•703•1010 F +1•972•294•4400
rtiservice@vanishpoint.com

© 2017 Copyright Retractable Technologies, Inc. Todos los derechos reservados.

M125 REV.0 SP, OCT 2017

NUEVO EASYPPOINT®

aguja retráctil



— FÁCIL DE USAR —


- cambio mínimo en la técnica de inyección
- permite la activación con una mano
- **las manos y los dedos del personal clínico permanecen detrás del objeto punzocortante expuesto** en todo momento



1
Una la aguja EasyPoint a cualquier jeringa luer lock o luer slip.*
Administre el medicamento conforme a la política institucional.




2
Empuje la lengüeta codificada con color, permitiendo que la aguja se retraiga automáticamente dentro de la cámara de seguridad. **Este dispositivo está diseñado para ser activado antes o después de retirar la aguja del paciente.**

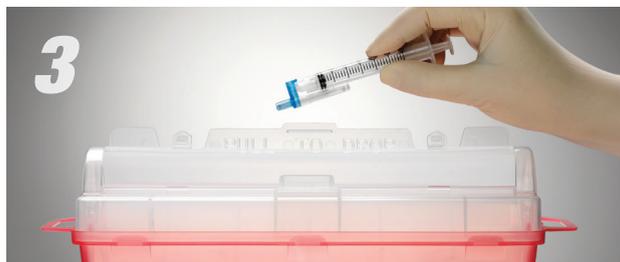

3
Deseche en un contenedor para objetos punzocortantes adecuado según el protocolo de la institución.

*Jeringa de 3 mL o más pequeña

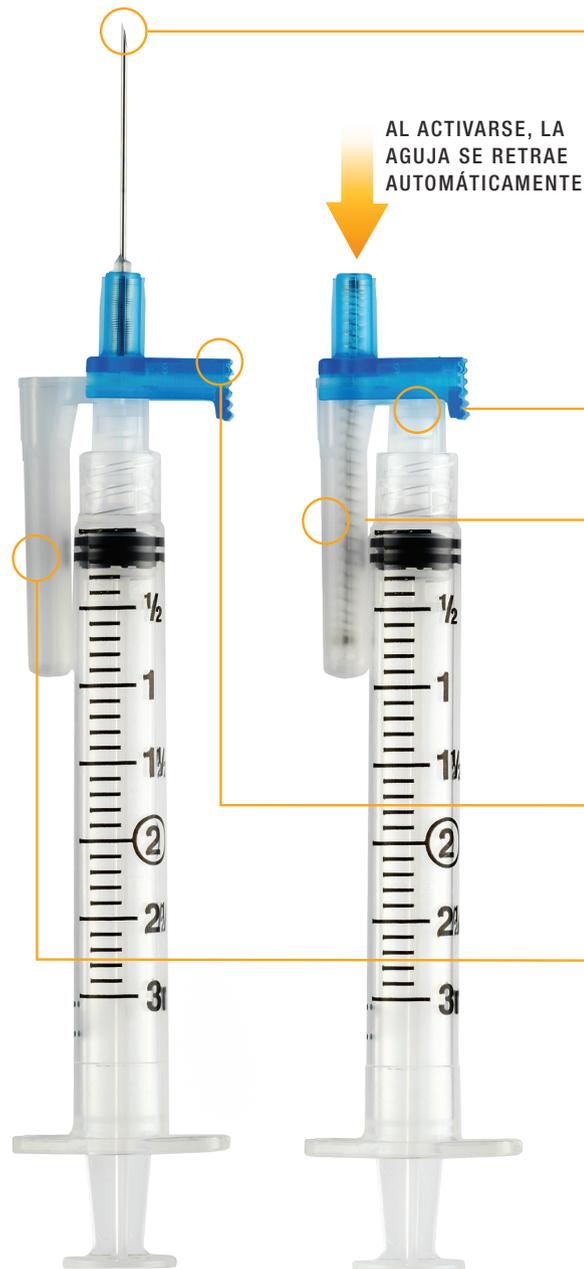

La aguja lubricada y con triple bisel brinda comodidad al paciente

AL ACTIVARSE, LA AGUJA SE RETRAE AUTOMÁTICAMENTE

El conector luer estándar brinda una conexión segura, resistente a fugas

Después de la retracción, la aguja contaminada queda encerrada dentro de una cámara de seguridad, evitando la exposición

El cono de la aguja y la lengüeta de activación están codificados con colores según el calibre de la aguja

Cámara de seguridad clara y compacta que no interfiere con la inyección

RETRACCIÓN AUTOMÁTICA
- ahora con -
VERSATILIDAD ADICIONAL

EASYPOINT®