

# VANISHPOINT® Conception sûre

## ► Mécanisme de sécurité automatique

*Les dispositifs à protection technique avec « fonction de sécurité automatique ou semi-automatique sont 10 fois moins associés aux blessures par aiguille que les dispositifs dont la fonction de sécurité est activée entièrement à la main. »\**

## ► L'activation avant le retrait élimine virtuellement toute exposition à l'aiguille

## ► Activation d'une seule main

## ► La conception du mécanisme de gâchette réduit les risques d'activation par inadvertance

## ► Fixation au tubulure dès la rétraction de l'aiguille, ce qui réduit les risques d'exposition au sang

## ► Reste sûr jusqu'à la mise au rebut

## ► Facile à utiliser, nécessite une formation minimale

## ► Sûr et efficace pour les patients

\* W. Tosini, et al., "Needlestick Injury Rates According to Different Types of Safety-Engineered Devices: Results of a French Multicenter Study," *Infection Control and Hospital Epidemiology*, vol. 31, no. 4 (Avril 2010), pp. 402-407.

Kits de prélèvement sanguin VanishPoint® 50 par boîte/200 par coffret

Numéro catalogue	Calibre d'aiguille	Longueur d'aiguille	Longueur de tubulure	Code couleur (couleur de gâchette)
24011	25	19 mm	178 mm	Orange ◀
24021	23	19 mm	178 mm	Bleu foncé ▶
24031	21	19 mm	178 mm	Vert sombre ▶
24111	25	19 mm	305 mm	Orange ▶
24121	23	19 mm	305 mm	Bleu foncé ▶
24131	21	19 mm	305 mm	Vert sombre ▶

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter RTI ou vous rendre sur notre site [www.vanishpoint.com](http://www.vanishpoint.com).

## Autres produits de sécurité disponibles



Seringue VanishPoint®



Cathéter intraveineux VanishPoint®



© 2012, 2016 Retractable Technologies, Inc.  
Tous droits réservés. M043 REV.3 FR, MAY 2016

511 Lobo Lane  
Little Elm, Texas 75068-5295 États-Unis  
Tél. : +1(972) 294-1770  
Fax : +1(972) 294-4400

Numéro gratuit aux États-Unis : 1-888-703-1010  
[rtisales@vanishpoint.com](mailto:rtisales@vanishpoint.com)

## SÉCURITÉ SANS COMPROMIS POUR LES CLINICIENS ET LES PATIENTS



**VANISHpoint®**  
KIT DE PRÉLÈVEMENT SANGUIN

La nouvelle norme de sécurité


# 1

Exécuter une ponction veineuse en observant le retour du sang.



# 2

Lorsque le prélèvement sanguin est terminé, appuyer sur la gâchette de rétraction.

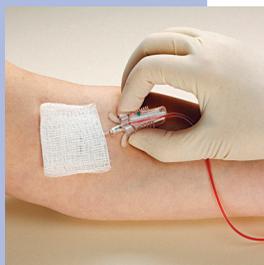

# 3

L'aiguille se rétracte automatiquement de la veine du patient dans le dispositif pour se fixer au tube.



# 4

Jeter le kit de prélèvement sanguin VanishPoint® dans un conteneur d'objets coupants, conformément au protocole.



Porte-tube non fourni

## la **VANISHPOINT**® **ADVANTAGE**

**Kit de prélèvement sanguin VanishPoint®**  
**La rétraction automatique dans la veine réduit efficacement le risque de blessure par l'aiguille et l'exposition au sang**

Passe-mains pour une manipulation facile



Indicateur de gâchette avec code couleur en fonction de la jauge d'aiguille

Corps transparent pour une visualisation du retour

L'aiguille se rétracte directement du patient, ce qui élimine virtuellement toute exposition à une aiguille contaminée



Dès sa rétraction d'aiguille se fixe au tubulure, ce qui réduit les risques d'exposition au sang

- ▶ La conception de la gâchette réduit les risques d'activation par inadvertance
- ▶ Tubulure résistant au pliage disponible en longueur 178 mm et 305 mm
- ▶ Fourni avec un adaptateur Luer amovible

- ▶ Ne contient pas de latex de caoutchouc naturel
- ▶ Ne contient pas de DEHP ni de PVC
- ▶ Peut être utilisé pour une courte injection (moins de 2 heures)