

## A prevenção de acidentes com agulhas que satisfaz as suas necessidades



- ▶ reduz exposições à agulhas contaminadas
- ▶ permite ativação com uma só mão
- ▶ mecanismo integrado de segurança
- ▶ uma vez ativada, a agulha se retrai com segurança para o descarte
- ▶ fácil de usar

**OS CATETERES IV VANISHPOINT® COM RESERVATÓRIO SÃO SEGUROS E EFICAZES**

Cateter I.V. VanishPoint® - Com Reservatório 50 por caixa/200 por estajo

Número de catálogo	Calibre	Comprimento polegada	mm	Diâmetro externo do cateter	Cateter Material	Codificação por cor
38221	24	¾	19	0,07 mm	Radiopaco	Amarelo
38331	22	1	25	0,09 mm	Radiopaco	Azul
38441	20	1¼	32	1,1 mm	Radiopaco	Rosa
38541	18	1¼	32	1,3 mm	Radiopaco	Verde
38641	16	1¼	32	1,7 mm	Radiopaco	Cinza
38741	14	1¼	32	2,1 mm	Radiopaco	Laranja

Outros tamanhos também estão disponíveis. Para uma lista completa, favor entrar em contato com a RTI ou visitar nosso website: [www.vanishpoint.com](http://www.vanishpoint.com)

### Outros Produtos de Segurança

**NOVO!**



Conjunto de coleta de sangue VanishPoint®



Porta-tubos de Recolha de Sangue VanishPoint®



Seringa VanishPoint®



© 2014 Retractable Technologies, Inc.  
Todos os direitos reservados. M065 REV00 PT, FEB 2014

511 Lobo Lane  
Little Elm, Texas 75068-0009 EUA  
Tel.: +1 972-294-1770  
Fax: +1 972-294-4400  
[rti.intl@vanishpoint.com](mailto:rti.intl@vanishpoint.com)

**COMPLETA SEGURANÇA PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E PACIENTES**



**VANISHpoint®**  
CATETER I.V. COM RESERVATÓRIO

O novo padrão de segurança

1

Realize a punção venosa, observando o retorno do sangue. Avance ligeiramente o cateter para assegurar a completa introdução na veia.



2

Mantendo a câmara de retorno estacionária, desengate o conector da agulha e avance o cateter na veia.



3

Antes de retirar a agulha do cateter, pressione a ponta colorida do compartimento da agulha para ativar a retração automática.



4

A agulha introdutória se retrairá para dentro do reservatório. Descarte a agulha introdutória em um coletor adequado para perfurocortantes.



Para injetar medicação usando o sistema aberto aplique as técnicas assépticas para:

Remover a tampa da medicação. Fixar firmemente a ponta de luer da seringa à abertura para injeção e injetar a medicação.

Após a injeção, fechar imediatamente a tampa da abertura para injeção.



# as VANTAGENS de VANISHPOINT®

Um cateter I.V. seguro com abertura para injeção, e com retração automatizada patenteada pela VanishPoint®



Os cateteres I.V. VanishPoint® com reservatório estão disponíveis em uma variedade de comprimentos e calibres

A abertura para injeção com tampa proporciona uma injeção de medicação segura e fácil

O apoio de dedos e o tubo da agulha transparentes proporcionam facilidade de manuseio e visualização do fluxo do sangue



Bisel de agulha com afiação precisa, facilitando a inserção com conforto ao paciente

As asas fornecem estabilização e fixação do encaixe do catéter

O encaixe, as asas e o reservatório do cateter possuem uma codificação de cores de acordo com as normas ISO para uma fácil identificação do calibre do cateter



A agulha se retrai automaticamente com uma leve compressão por detrás do tubo transparente. Uma vez ativada, a agulha se retrai com segurança para o interior do tubo transparente, prevenindo acidentes com perfurocortantes