



Injektionsspritze


Standard-Entnahmeverfahren

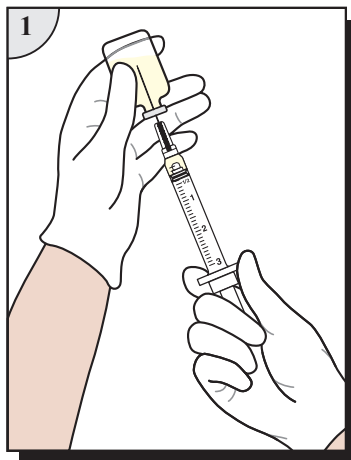

Automatische Retraktion im Patienten

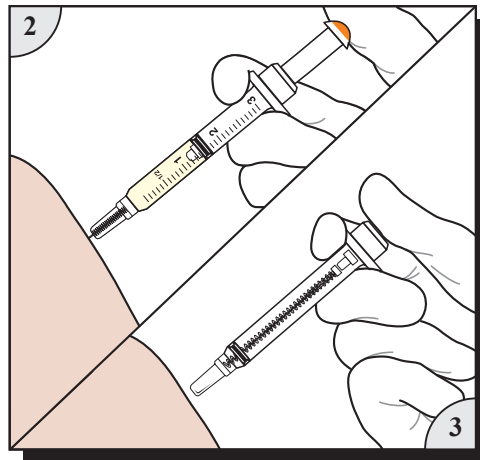

Nicht wieder verwendbar

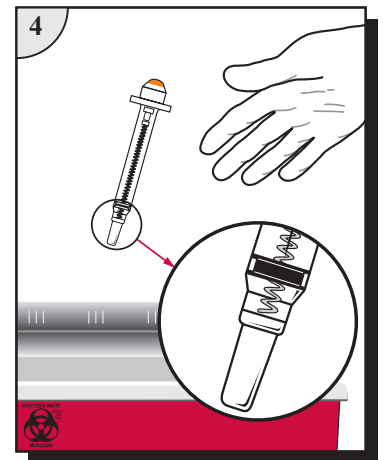

Informationen zum Produktgebrauch:

1. Injektionen sind gemäß der geltenden Bestimmungen mit aseptischen Techniken vorzubereiten und zu verabreichen.
2. Für Injektionen in Patienten den Kolben weiter nach unten drücken, um die automatische Retraktion der Kanüle auszulösen, **während sich die Kanüle noch im Patienten befindet**. Für Injektionen in i.v. Spritzenports den Kolben weiter nach unten drücken, um die automatische Retraktion der Kanüle auszulösen, und **anschließend die Kanüle umgehend vom Spritzenport entfernen. Die volle Dosis wird nur bei Aktivierung der Nadelretraktion verabreicht**.
3. Die Kanüle wird automatisch in die Spritze zurückgezogen. So wird Kontakt mit der kontaminierten Kanüle verhindert, und die Spritze kann nur einmal verwendet werden. Für den Fall, dass der Nadelrückziehmechanismus nicht aktiviert wird, Spritze gemäß Richtlinien der Einrichtung in einer Kanülenabwurfbox entsorgen. Kontaminierte Nadeln nicht wieder verschließen.
4. Die VanishPoint® Spritze vorschriftsgemäß in einem geeigneten Abfallbehälter entsorgen.

Vorsichtsmaßnahmen:

- Nur zum einmaligen Gebrauch. Die Wiederverwendung dieses Geräts kann zur Einwirkung mit durch Blut übertragenen Krankheitserregern führen, einschließlich Hepatitis B-Virus (HBV), Hepatitis C-Virus (HCV) und HI-Virus (HIV).
- Inhalt ist steril, ungiftig und nicht-pyrogen. Nicht verwenden, wenn das Produkt oder die Verpackung beschädigt ist.
- Ohne natürlichen Latexkautschuk hergestellt.
- Nur mit der angebrachten Kanüle verwenden. Die Kanüle kann nicht ausgetauscht werden.
- Die Kanüle wird nur dann automatisch zurückgezogen, wenn der Zylinder geleert und der Kolben vollständig nach unten gedrückt ist.
- Bei Anwendungen, bei denen nicht der vollständige Inhalt verabreicht wurde, den verbliebenen Inhalt entsprechend den Vorgaben Ihrer Einrichtung entleeren und Nadelretraktion aktivieren.

